

# INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN

*DNA-Labor*

Prof. Dr. med. Ch. Rittner

*Facharzt für Rechtsmedizin*

Dr. rer. nat. G. Rittner

*Sachverständige für Abstammungsuntersuchungen*



67655 Kaiserslautern

Kerststr. 27-31

Ruf: (0631) 68045

FAX: (0631) 68046

Mail: Rechtsmedizin-

KL@t-online.de

---

08. Juni 2006

Prof.Ri/Ko

## **Entnahmeanweisung für Probennehmer für Mundschleimhautabstriche (Fa. Whatmann)**

Personen, denen Mundschleimhautproben entnommen werden sollen, dürfen vorher nichts gegessen oder getrunken haben. Wenn doch, sollte der Mund mit Wasser ausgiebig gespült werden.

Die Person, die Mundschleimhautproben entnimmt, sollte Einmalhandschuhe tragen.

1. Öffnen Sie den Entnahmeset und entnehmen Sie den Probenkamm ohne die Spitze zu berühren.
2. Halten Sie den Probennehmer am Griff und streichen Sie 5 – 6 mal kräftig an der Wangeninnenseite lang, ohne den Entnahmegriff niederzudrücken.
3. Drücken Sie nach der Entnahme den Kamm nach unten in das Probenröhrchen durch kräftigen Druck am Entnahmegriff aus.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei der 2. Entnahme, drücken Sie den Kamm in das 2. Röhrchen aus.